


Im Stationsdisplay werden alle Rufe, Meldungen und Störungen angezeigt. Das Display besteht aus 2 Zeilen und 4 Textfeldern. Es gibt 2 mögliche Varianten der Darstellung:

(Nur durch Service einstellbar)

Darstellung mit langen Rufertexten:

Zeile 1: Rufertext 10 Zeichen


Zeile 2: Stationsname 5 Zeichen, Zimmerbezeichnung 6 Zeichen, Rufort 2 Zeichen.

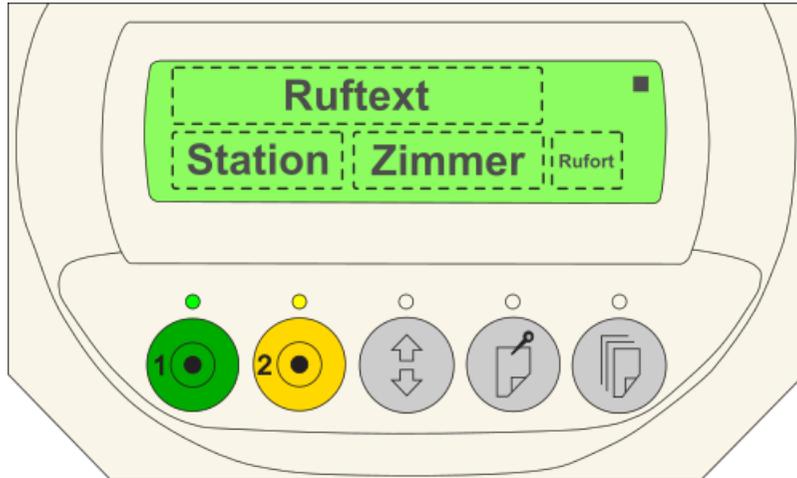

Darstellung mit kurzen Rufertexten:

Zeile 1: Stationsname 8 Zeichen, Rufertext 6 Zeichen

Zeile 2: Zimmerbezeichnung 6 Zeichen, Rufort 8 Zeichen.

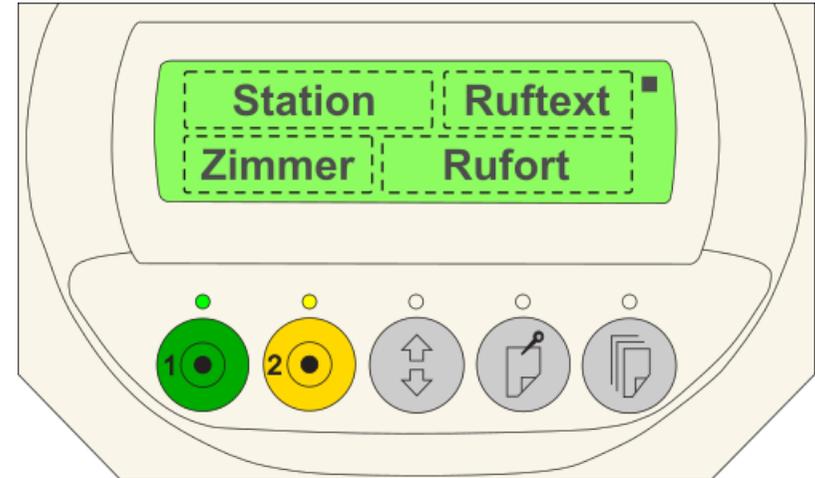

Taste	Bedeutung
	Anwesenheit 1 (grün) Anwesenheit markieren und löschen Display ein- und ausschalten
	Anwesenheit 2 (gelb) Anwesenheit markieren und löschen Display ein- und ausschalten
	Funktionstaste Ins Funktionsmenü springen Im Funktionsmenü eine Ebene zurück
	Merktaste Bei Ruf merken, bei Störung quittieren Im Funktionsmenü Auswahl bestätigen
	Blätterertaste Bei mehreren Rufen Rufe durchblättern Im Funktionsmenü Menü durchblättern

Funktion	Bedienung
Stationsdisplay ein- und ausschalten	Bei ausgeschaltetem Display wird auch der Signalton des Stationsdisplays abgeschaltet! <ul style="list-style-type: none"> Anwesenheit 1 oder Anwesenheit 2 drücken Display kann immer eingeschaltet sein, ausschalten nicht möglich (nur durch Service einstellbar)
Rufe merken	Signalton wird zeitweise abgestellt, Ruflampe am Rufort blinkt grün, nach Ablauf der Merkzeit wird der Ruf automatisch wiederholt, wenn er am Rufort nicht gelöscht wurde. <ul style="list-style-type: none"> Taste Merken drücken
Merken bei mehreren Rufen	LED über der Blätterertaste leuchtet, rechts oben statt Punkt erscheint ein Stern, rechts erscheint ein Pfeil nach unten - die Blätterertaste kann bedient werden: <ul style="list-style-type: none"> Rufe durchblättern, den gerade angezeigten Ruf merken.
Störungen oder Meldungen bearbeiten	Beachten Sie angezeigte Störungen! Verständigen Sie Ihre vorgesetzte Dienststelle bzw. die Serviceabteilung entsprechend Ihrer Dienstanweisung. <ul style="list-style-type: none"> Merktaste drücken, die Störung bzw. Meldung wird dadurch quittiert. Durch quittieren wird eine Störung oder Meldung in die Liste der Störungen bzw. Meldungen verschoben. <p>Bei Störungen erscheint ein blinkendes „S“ in der oberen Zeile rechts. Bei Meldungen erscheint ein blinkendes „M“ in der oberen Zeile rechts. Erst wenn die Ursache der Störung oder Meldung behoben wurde, wird die Störung oder Meldung aus der Liste gelöscht. In der oberen Zeile rechts erscheint ein blinkender Punkt ■ Die Rufanlage ist dann in Ordnung.</p>

Wenn das Stationsdisplay **Notbetrieb** anzeigt, benachrichtigen Sie umgehend Ihre vorgesetzte Dienststelle oder die Serviceabteilung entsprechend Ihrer Dienstanweisung!

Störungs - Abkürzungen	Beschreibung der Störung	Maßnahme
KnotST / KS / ST	Knotenstörung Ausfall einer Elektronik im Netzwerk der Rufanlage. Je nach Art der Elektronik kann ein Zimmer oder eine zentrale Funktion der Rufanlage ausgefallen sein. Der ordnungsgemäße Betrieb der Rufanlage ist nicht mehr sichergestellt.	Genauere Bezeichnung der Störung ablesen. Bei eindeutiger Zimmerbezeichnung entsprechendes Zimmer sperren. Vorgesetzte Dienststelle oder Serviceabteilung sofort informieren!
LinieS / LS / ST	Linienstörung Ausfall einer im Zimmer verbauten Komponente. Der Betrieb im betroffenen Zimmer ist eingeschränkt. Der Betrieb der Rufanlage wird nicht beeinträchtigt.	Genauere Bezeichnung der Störung ablesen. Im betroffenen Zimmer falls erforderlich entsprechendes Bett sperren. Vorgesetzte Dienststelle oder Serviceabteilung sofort informieren!
PSA ST / PS / ST	Störung der PSA Ausfall der Weiterleitung von Rufen an die Personensuchanlage oder an ein DECT System ist ausgefallen. Der Betrieb der Rufanlage wird nicht beeinträchtigt.	Benutzung der PSA / DECT einstellen. Vorgesetzte Dienststelle oder Serviceabteilung sofort informieren!
PH ST / PH / STH	Störung des Patientenhandgeräts Ausfall eines eingesteckten Patientenhandgerätes oder anderen Rufmelders. Die Benutzung dieser Komponente ist nicht mehr möglich. Der Betrieb der Rufanlage wird nicht beeinträchtigt.	Prüfen Sie, ob das betroffene Patientenhandgerät korrekt eingesteckt ist. Prüfen Sie dann, ob ein Ruf ausgelöst werden kann. Wenn nein, tauschen Sie das Patientenhandgerät aus. Andernfalls vorgesetzte Dienststelle oder Serviceabteilung informieren.
Funktion	Beschreibung und Bedienung	Tastenbedienung
Zusammenschaltung Ein- und Ausschalten	Mehrere Pflegegruppen oder Stationen zu einer größeren Organisationseinheit zusammenschalten, Rufe werden an alle markierten Anwesenheiten dieser Einheit weitergeleitet. 1. Funktionstaste drücken, Blättertaste so oft drücken bis „Zusammenschaltung“ erscheint, Merktaste drücken um die Auswahl zu bestätigen. 2. Blättertaste so oft drücken bis die gewünschte Zusammenschaltung mit aktuellem Stand „Ein“ oder „Aus“ erscheint, Merktaste drücken um die Auswahl zu bestätigen. Anschließend Funktionstaste zwei mal drücken um Menü zu verlassen.	
Lautstärke der akustischen Rufnachsendung ändern	Alle Rufe werden in der Station an alle Zimmer mit markierter Anwesenheit akustisch nachgesendet. Das Pflegepersonal wird so über Rufe informiert, auch wenn es sich nicht am Stützpunkt aufhält. Die eingestellte Lautstärke betrifft alle akustischen Melder der Station. 1. Funktionstaste drücken, Blättertaste so oft drücken bis „Rufnachsendung“ erscheint, Merktaste drücken um die Auswahl zu bestätigen. 2. Blättertaste so oft drücken bis die gewünschte Lautstärke erscheint, Funktionstaste zwei mal drücken um Menü zu verlassen.	
Durchsage ausführen (Nur bei Rufanlagen mit Sprechen)	Sie können Durchsagen ausführen in der gesamten Rufanlage, stationsweise, gruppenweise oder an alle markierten Anwesenheiten. Während einer Durchsage besteht eine einseitige Sprechverbindung in Richtung Zimmer, ein Abhören der Zimmer ist nicht möglich. 1. Funktionstaste drücken, Blättertaste so oft drücken bis „Durchsage“ erscheint, Merktaste drücken um die Auswahl zu bestätigen. 2. Blättertaste so oft drücken bis das gewünschte Durchsageziel erscheint, Hörer abheben um die Durchsage auszuführen und wieder auflegen um diese zu beenden.	
Zimmer mit Anwesenheit ansprechen (Nur bei Rufanlagen mit Sprechen)	Sie können ein beliebiges Zimmer der Station ansprechen, solange dort mindestens eine Anwesenheit markiert ist. 1. Blättertaste so oft drücken bis das gewünschte Zimmer mit Anwesenheit erscheint. 2. Hörer abheben um das ausgewählte Zimmer anzusprechen und wieder auflegen um die Sprechverbindung zu beenden.	